

자동심장충격기 사용법


How To Use an Automated External Defibrillator (AED) / 自动心肺除颤仪(AED)使用方法

| 주 | 나 눔 테 크 1577-8515

먼저 119에 신고하세요. / Call 119 / 首先紧急申报119

1 전원버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

Press the power button to turn on the power
按下电源按钮开启电源


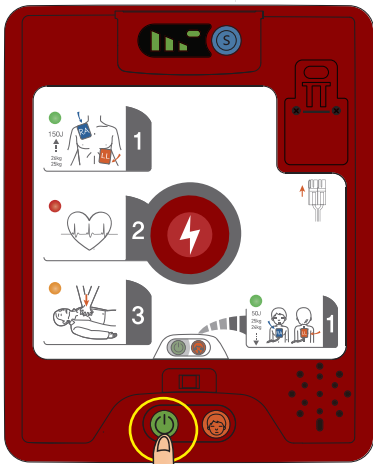


성인용 모드 (25kg 이상)

Adult Mode for patients weighing at least 25KG
成人用模式(25Kg 以上)

전원버튼을 누른다(전원 ON)

Press the power button to turn on the power
按下电源按钮开启电源

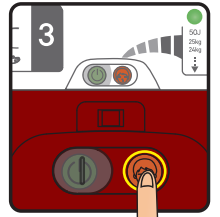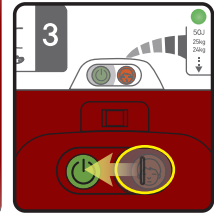

2초간 누름
Push for at least 2 seconds
按住2秒



소아용 모드 (25kg 미만)

Pediatric (Child) Mode for patients weighing less than 25KG
少儿用模式(25Kg 以下)

소아용 전원버튼을 누른다.

Push the Child Mode toggle button.
按下幼儿电源按钮


! 작동온도를 벗어난 환경에서 장비가 작동되면 음성안내에 따라 S 버튼을 2초간 누르면 작동합니다.

2 음성안내에 따르세요.

Follow the instructions of the voice prompts.
请按照语音提示进行操作

1 패드부착하기

Attach the pads to the patient in the locations indicated on the pads pictures
将贴片贴附

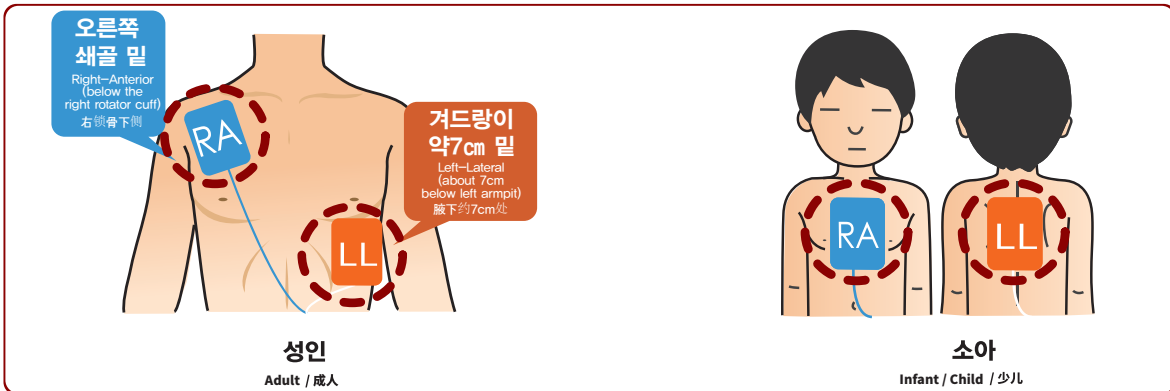

2 환자와 접촉금지

Don't touch the patient until instructed to commence CPR
不要接触到患者



3 전기충격버튼 누르기

Push the flashing red shock button
按下电击按钮



4 흉부압박

Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)
进行胸压

